

medica

MEDIZINISCHE LABORATORIEN Dr. F. KAEPELI AG

Präanalytik

Blutentnahme

Klinische Chemie | Spezialanalytik | Hämatologie



Kurz-Info

Patienteninformation

- Nüchtern
12 Stunden Nahrungskarenz
24 Stunden Alkoholkarenz
- Extreme Körperbelastung vermeiden
- Vor Blutentnahme 10 bis 15 Minuten ruhen

Blutentnahme

- Idealer Zeitpunkt 7.00–9.00 Uhr
- Patient immer in derselben Position, sitzend oder liegend
- Maximal eine Minute stauen
- Nicht mit der Faust pumpen

Wahl der Punktionsstelle

- Vena m.b. | Vena m.ce. | Vena m.cu. | Vena m.a.
- Niemals oberhalb einer Infusionsstelle

Serothek

- Einwandfrei eingesandte Seren werden für Sie **kostenlos** mindestens 8 Monate bei -20°C aufbewahrt.

SRK Richtlinie für Blutgruppen:
EDTA-Röhrchen mit Namen, Vornamen und vollständigem Geburtsdatum (tt-mm-jjjj) beschriften.

Reihenfolge der Röhren bei der Blutentnahme



BLUTKULTUR

BacT-Alert



GERINNUNG

Natrium-Citrat 1+9

Cave: mit Butterfly 1. Röhren verwerfen!



SENKUNG

Natrium-Citrat 1+4



CHEMIE

Trenngel (mit Gerinnungsaktivator)



PRAXIS-CHEMIE

Heparin



HÄMATOLOGIE

K2-EDTA



GLUKOSE

Fluorid



SPURENELEMENTE

Spezialröhren

Monovette: Extrakanüle

Bitte alle Röhren sofort nach der Blutentnahme 5–10x überkopf schwenken!

Bei Fragen freuen
wir uns über Ihren Anruf.
044 269 99 99



medica

MEDIZINISCHE LABORATORIEN Dr. F. KAEPPELI AG
Wolfbachstrasse 17, Postfach, 8024 Zürich
Telefon 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info@medica.ch www.medica.ch