



MEDICA
Medizinische Laboratorien



Präanalytik Blutentnahme

Klinische Chemie | Spezialanalytik | Hämatologie

Patienteninformation

- Nüchtern
12 Stunden Nahrungskarenz
24 Stunden Alkoholkarenz
- Extreme Körperbelastung vermeiden
- Vor Blutentnahme 10 bis 15 Minuten ruhen

Blutentnahme

- Idealer Zeitpunkt 7.00 – 9.00 Uhr
- Patient immer in derselben Position, sitzend oder liegend
- Maximal eine Minute stauen
- Nicht mit der Faust pumpen

Wahl der Punktionsstelle

- Vena m.b. | Vena m.ce. | Vena m.cu. | Vena m.a.
- Niemals oberhalb einer Infusionsstelle

Serothek

- Einwandfrei eingesandte Seren werden für Sie **kostenlos** mindestens 8 Monate bei -20°C aufbewahrt.



SRK Richtlinie für Blutgruppen:

EDTA-Röhrchen mit Namen, Vornamen und vollständigem Geburtsdatum (tt-mm-jjjj) beschriften.

Reihenfolge der Röhren bei der Blutentnahme



Blutkultur

BacT-Alert



Gerinnung

Natrium-Citrat 1+9

Cave:
mit Butterfly 1. Röhren verwerfen!



Senkung

Natrium-Citrat 1+4



Chemie

Trenngel
(mit Gerinnungsaktivator)



Praxis-Chemie

Heparin



Hämatologie

K2-EDTA



Glukose

Fluorid



Spurenelemente

Spezialröhrchen
Monovette: Extrakanüle

Bitte alle Röhren sofort nach der Blutentnahme 5 - 10 x überkopf schwenken!



Bei Fragen freuen
wir uns über Ihren Anruf.

044 269 99 99



MEDICA
Medizinische Laboratorien

MEDICA

Medizinische Laboratorien AG

Wolfbachstrasse 17 | Postfach
8024 Zürich

www.medica.ch

© 2024 MEDICA Medizinische Laboratorien AG.
Alle Rechte vorbehalten. Für Versehen, Fehler
oder ungenaue Preisangaben wird im gesetz-
lich zulässigen Umfang jegliche Haftung ab-
gelehnt. Die Texte, Bilder und Inhalte unterlie-
gen dem Copyright von MEDICA Medizinische
Laboratorien AG.

Ausgabe 05/2024