





Präanalytik | Blutentnahme

Reihenfolge der Röhrgen bei der Blutentnahme

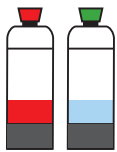

BLUTKULTUR

BacT-Alert

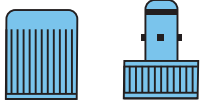

GERINNUNG


Natrium-Citrat 1+9

Cave: mit Butterfly 1. Röhrgen verwerfen!



SENKUNG

Natrium-Citrat 1+4

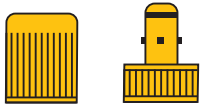

CHEMIE

Trenngel (mit Gerinnungsaktivator)



PRAXIS-CHEMIE

Heparin




HÄMATOLOGIE

K2-EDTA



GLUKOSE

Fluorid

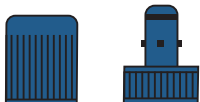

SPURENELEMENTE

Spezialröhrgen

Bitte alle Röhrgen sofort nach der Blutentnahme 5 - 10x überkopf schwenken!