



# Reihenfolge der Röhrcchen bei der Blutentnahme

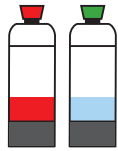

## BLUTKULTUR

BacT-Alert

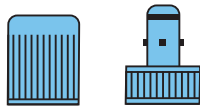

## GERINNUNG


Natrium-Citrat 1+9

*Cave: mit Butterfly 1. Röhrcchen verwerfen!*




## SENKUNG

Natrium-Citrat 1+4

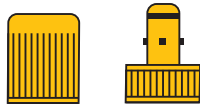

## CHEMIE

Trenngel (mit Gerinnungsaktivator)

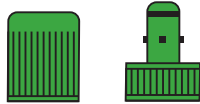


## PRAXIS-CHEMIE

Heparin



## HÄMATOLOGIE

K2-EDTA

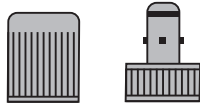

## GLUKOSE

Fluorid



## SPURENELEMENTE

Spezialröhrcchen

*Bitte alle Röhrcchen sofort nach der Blutentnahme 5–10x überkopf schwenken!*