
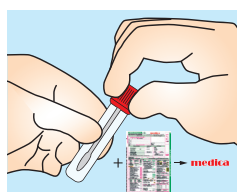
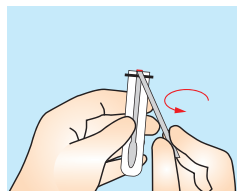
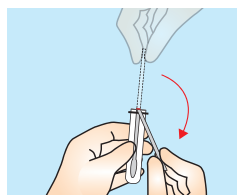
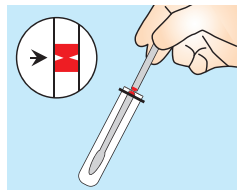


# Abstrich mit e-Swab™

## Vorbereitung

- Ein Basis-Set enthält immer ein Medium (Röhrchen mit Flüssigkeit) und einen Abstrichtupfer grob
- Zusätzlich können je nach Entnahmeort weitere Tupfer bestellt werden (siehe auch Rückseite):
  - Grob: Vagina, Cervix, Rektum, Wunden, Rachen
  - Mittलगrob: Urethral
  - Fein: Nasopharyngeal

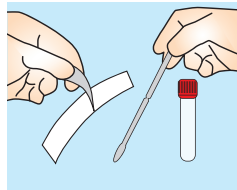

## Wichtige Hinweise

- Bitte verwenden Sie für den Test ausschliesslich den im Basis-Set enthaltenen Tupfer oder die zusätzlich bestellbaren Abstrichtupfer «Urethral» und «Nasopharyngeal». Herkömmliche Tupfer sind nicht geeignet.

- 1 Entnehmen Sie den passenden Spezialtupfer (FLOQSwab) aus der Verpackung.

Führen Sie den gewünschten Abstrich beim Patienten durch.

- 2 Drehen und entfernen Sie den Deckel des e-Swab-Proberöhrchens, achten Sie darauf, das Transportmedium nicht zu verschütten.

Führen Sie den Abstrichtupfer soweit in das Röhrchen ein, bis sich die rot markierte Sollbruchstelle auf Höhe der Röhrchenmündung befindet.

- 3 Halten Sie das Proberöhrchen entfernt vom Gesicht und brechen Sie den Abstrichtupfer an der rot markierten Sollbruchstelle ab.

- 4 Entsorgen Sie den abgebrochenen Griff des Tupferschafts.

- 5 Bringen Sie den Deckel wieder an und schliessen Sie ihn gut. Achten Sie darauf, dass das Röhrchen korrekt beschriftet ist. Senden Sie das Röhrchen zusammen mit dem Auftragsformular an **medica**.

## Abstrich mit e-Swab™



### **Basis Set – Grob**

Vagina, Cervix, Rektum, Wunden, Rachen  
Art. Nr. 02001604



### **Urethral – Mittelgrob**

Art. Nr. 02001735



### **Nasopharyngeal – Fein**

Art. Nr. 02001736