



Präanalytik | Blutentnahme


Tuberkulose Suchtest QuantiFERON®-TB Gold Plus

QuantiFERON®-TB Gold Plus ist ein modernes Testverfahren zum indirekten Nachweis einer latenten oder aktiven Tuberkulose. Der Test ist dem Tuberkulintest (Mantoux) in Spezifität überlegen. Positive Ergebnisse müssen mittels Kultur und PCR bestätigt werden.

Vereinfachte Präanalytik: In der Praxis kann das Blut mittels einem einzigen Lithium-Heparin-Röhrchen entnommen werden.


Wichtige Hinweise

- Nach der Blutentnahme muss die Probe innerhalb von 48 Stunden im Labor eintreffen.
Falls der Transport ins Labor innerhalb 48 Stunden nicht gewährleistet ist, rufen Sie uns bitte an:
Telefon 044 269 99 99

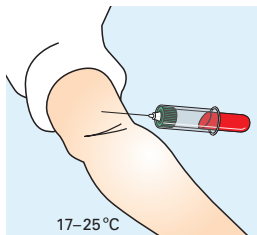

In der Praxis

Entnehmen Sie ein Lithium-Heparin-Röhrchen mit **mindestens 5 ml Blut**. Mischen Sie den Inhalt, indem Sie das Röhrchen mehrfach vorsichtig kippen. **Beschriften** Sie das Röhrchen und geben Sie dabei auch die **Uhrzeit der Blutentnahme** an.

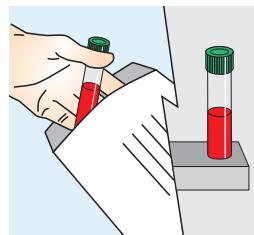

Einsendung ins Labor

Versenden Sie das Röhrchen bei Raumtemperatur ins Labor. Der Versand sollte nach der Blutentnahme so rasch wie möglich erfolgen, da die laborseitige Verarbeitung **innerhalb von 48 Stunden** nach der Blutentnahme beginnen muss.

Am besten planen Sie die Blutentnahme zu einem Zeitpunkt, **bevor Ihr Kurier** die Proben bei Ihnen abholt.