

NIPT Prendia-VeriSeq - Entnahmeanleitung

1

Benötigtes Material:



1 Streck-Röhrchen + 1 BD Vacutainer® Eclipse Kanüle + 1 Behälter

2

Blutentnahme mit Streck-Röhrchen



- 1 Stechen Sie die Patientin mit der BD Vacutainer® Eclipse Kanüle inkl. montiertem Adapter, ohne das Streck-Röhrchen einzuschieben.
- 2 Schieben Sie dann das Streck-Röhrchen ein und fahren Sie mit der Blutentnahme fort. Entnehmen Sie mindestens 7ml Blut.

3

Entfernen Sie das Streck-Röhrchen und mischen Sie den Inhalt durch 10-faches Umdrehen (invertieren) des Röhrchens.



5

Versand



Geben Sie das Röhrchen in die mit dem NIPT Prendia-VeriSeq Set gelieferte Schutzhülse und beachten Sie die im Set beigelegten Anweisungen.

4

Beschriften Sie das Streck-Röhrchen mit dem Vor- und Nachnamen sowie dem Geburtsdatum der Patientin.

